

FICHA TÉCNICA

ATADURA DE CREPE NOBRE - LIGHT

As ataduras de crepe Nobre Light são produzidas com tecido de algodão cru, de baixa densidade de fios e malha simples, apresentando cor natural e sendo livres de substâncias gordurosas. Oferecem elasticidade ideal para seu uso e são fornecidas em rolos cilíndricos uniformes, isentos de defeitos. São insípidas, inodoras e isentas de amido, goma, corantes, álcalis e ácidos. Apresentam-se como um tecido urdido com tramas e fios com torção, sem ação farmacológica.



INSTRUÇÕES DE USO

Recomenda-se o uso por pessoas habilitadas na área;

- Escolher o modelo de acordo com o uso pretendido;
- Retirar a atadura da embalagem original e verificar sua integridade;
- Verificar a largura correta que será necessária para a aplicação;
- Realizar a limpeza e secagem da pele onde a Atadura de crepom será aplicada;
- Enrolar em volta do segmento tratado, esticada para que faça boa compressão, de modo a manter o curativo bem posicionado, evitando assim, qualquer tipo de escoriação na pele ou desconforto durante o uso;
- Evitar cobrir os dedos das mãos ou pés ao enfaixar, para facilitar verificar a circulação;
- Utilizar adesivo tipo esparadrapo ou fita crepe para prender a ponta final da atadura;
- Após a finalização da aplicação, verificar se não ficou muito apertado e como está a circulação do sangue no local;
- Deve-se afrouxar a atadura se ocorrer inchaço, manchas, sensação de frio, entorpecimento ou formigamento da área a ser tratada;
- Refazer se for necessário.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Informações	
Nome técnico	Atadura
Nome comercial	Atadura de Crepe NOBRE LIGHT
Processo Anvisa n°	25351.100320/2025-76
Registro Anvisa n°	82453690003
Composição	80% algodão, 16% poliéster e 4% elastano.
Validade	5 anos após a data de fabricação

Produto de uso único – Proibido reprocessar.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES/RESTRIÇÕES

Artigo Médico-Hospitalar
Descartar após o Uso
Não usar o produto se a embalagem se apresentar danificada, aberta ou molhada.

Produto não reprocessado: O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Largura	06 cm / 08 cm / 10 cm / 12 cm / 15 cm / 20 cm / 25 cm / 30 cm
Comprimento	1,2 metros
Embalagem primária	1 Unidade
Embalagem secundária	Fardo com: 150 / 125 / 100 / 80 / 60 / 50 e 45 dúzias
Fios	9 fios
Dimensões do produto não dobrado (aberto)	



Santo Antônio da Posse - SP



vendas@fortclean.com



www.fortclean.com



(19) 3896-2101 | 3896-2315

A FORTCLEAN É UMA INDÚSTRIA COM MAIS DE 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE QUALIDADE PARA O MERCADO HOSPITALAR.