### FICHA TÉCNICA

## COMPRESSA ALGODONADA ESTÉRIL

A compressa Algodonada – curativo cirúrgico estéril – é composta por manta 100% algodão, envolta em tecido de gaze, oferecendo maciez e excelente absorção. O produto é esterilizado por Óxido de Etileno (E.T.O.), garantindo segurança e assepsia. É indicado para limpeza e antissepsia da pele, sendo amplamente utilizado em procedimentos cirúrgicos, graças ao seu alto poder de absorção de fluidos e secreções. Também é ideal para curativos em feridas abertas e cobertura de incisões no pósoperatório.



#### **INSTRUÇÕES DE USO**

- Higienize as mãos antes de manusear o produto;
- Abra a embalagem de forma asséptica;
- Remova a compressa de forma estéril com auxílio de luvas e pinças;
- Aplique a compressa sobre a área a ser tratada de acordo com a necessidade:

Para curativos: posicione diretamente sobre a ferida ou incisão.

Para absorção: utilize durante o procedimento conforme a necessidade;

Para limpeza: umedeça com solução antisséptica.

- Se necessário, fixe com fita cirúrgica ou outro método de contenção estéril.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

# INFORMAÇÕES DO PRODUTO Informações Nome técnico Nome comercial Processo Anvisa n° 25351.694388/2022-61 Registro Anvisa n° 82453699002 Composição Validade Produto de uso único – Proibido reprocessar.

#### ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES/RESTRIÇÕES

Artigo Médico-Hospitalar Descartar após o Uso Não usar o produto se a embalagem se apresentar danificada, aberta ou molhada.

> Produto não reprocessado: O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	
Camadas	
Densidade	
Embalagem primária	1 unidade
Embalagem secundária	10X15 - 250 UNIDADES NA CAIXA 15X30 - 150 UNIDADES NA CAIXA 15X60 - 100 UNIDADES NA CAIXA
Dobras	
Dimensões do produto dobrado (fechado)	
Dimensões do produto não dobrado (aberto)	10x15 / 15x30 / 15x60 - Aberta









vendas@fortclean.com





