

COMPRESSA ALGODONADA ESTÉRIL

A compressa Algodonada – curativo cirúrgico estéril – é composta por manta 100% algodão, envolta em tecido de gaze, oferecendo maciez e excelente absorção. O produto é esterilizado por Óxido de Etileno (E.T.O.), garantindo segurança e assepsia. É indicado para limpeza e antisepsia da pele, sendo amplamente utilizado em procedimentos cirúrgicos, graças ao seu alto poder de absorção de fluidos e secreções. Também é ideal para curativos em feridas abertas e cobertura de incisões no pós-operatório.



INSTRUÇÕES DE USO

- Higienize as mãos antes de manusear o produto;
- Abra a embalagem de forma asséptica;
- Remova a compressa de forma estéril com auxílio de luvas e pinças;
- Aplique a compressa sobre a área a ser tratada de acordo com a necessidade:
 - Para curativos: posicione diretamente sobre a ferida ou incisão.
 - Para absorção: utilize durante o procedimento conforme a necessidade;
 - Para limpeza: umedeça com solução antisséptica.
- Se necessário, fixe com fita cirúrgica ou outro método de contenção estéril.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Informações	
Nome técnico	Compressas
Nome comercial	Compressa Algodonada Estéril FORTCLEAN
Processo Anvisa n°	25351.694388/2022-61
Registro Anvisa n°	82453699002
Composição	Tecido 100% algodão.
Validade	36 meses após a data de esterilização.

Produto de uso único – Proibido reprocessar.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES/RESTRIÇÕES

Artigo Médico-Hospitalar
Descartar após o Uso
Não usar o produto se a embalagem se apresentar danificada, aberta ou molhada.

Produto não reprocessado: O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Camadas	
Densidade	
Embalagem primária	1 unidade
Embalagem secundária	10X15 - 250 UNIDADES NA CAIXA 15X30 - 150 UNIDADES NA CAIXA 15X60 - 100 UNIDADES NA CAIXA
Dobras	
Dimensões do produto dobrado (fechado)	
Dimensões do produto não dobrado (aberto)	10x15 / 15x30 / 15x60 - Aberta



Santo Antônio da Posse - SP



vendas@fortclean.com



www.fortclean.com



(19) 3896-2101 | 3896-2315